

PRIMA DI INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PROCEDERE A:

- RIPORRE GLI EFFETTI PERSONALI (OROLOGI, GIOIELLI, CELLULARE, ECC.)
- LEGARE I CAPELLI



1

IGIENE DELLE MANI



2

INDOSSARE I GAMBALI
(DOVE PREVISTO)



3

IGIENE DELLE MANI
RIPETERE LE AZIONI AL PUNTO 1



4

INDOSSARE FACCIALE FILTRANTE FFP2



5

INDOSSARE UN PRIMO PAIO DI GUANTI
(TAGLIA CORRETTA)



6

INDOSSARE IL CAMICE



7

INDOSSARE:

- LA MASCHERINA CHIRURGICA CON VISIERA
- OPPURE MASCHERINA CHIRURGICA E OCCHIALI PROTETTIVI O VISIERA



8

INDOSSARE LA CUFFIA



9

INDOSSARE UN SECONDO PAIO DI GUANTI



VESTIZIONE SI AEROSOL

SEQUENZA DI VESTIZIONE E SVESTIZIONE IN AMBIENTI COVID-19